



Betjening af det 3-delte neglegreb.



Billede 1.

Viser forskellen på de 3 delte og 2 delte skafter når de er adskilte

Billede 2.

Viser skafterne når de er samlede

Billede 3 og 4

Fastspænding af neglebladet:

Når kuglehovedet er løst, sættes neglebladet. Skru let på kuglehovedet til du mærker lidt modstand. Tag fat om spænde delen (billede 4) med den ene hånd og om grebet (billede 3) med den anden hånd. Drej nu spændedelen mod urets retning mens du holder godt fat om grebet.

Løsne neglebladet:

Hold om grebet på samme måde som beskrevet for fastspænding, dog drejes spændedelen nu med urets retning og neglebladet løsnes nemt. For at få bladet helt ud, drejes der herefter på det løse kuglehoved.

Ved tredelte skafter vil du altid nemt kunne fastspænde og løsne dit negleblad. Du oplever derfor ikke at skulle benytte en tang eller lignende for at få spændt eller løsnet neglebladet som kan være en nødvendighed ved det 2 delte skaft.

OBS: kuglehovederne på de to skafter er forskellige, så de passer kun på deres eget tilhørende skaft. Derfor bør de holdes adskilte.