



gigasept® AF forte

gigasept® AF forte er et aldehydfrit præparat til rengøring og desinfektion af stive og fleksible endoskoper samt kirurgiske instrumenter.

Vores fordele:

- aldehydfrit
- velegnet til fleksible og stive endoskoper
- forkortet virkningstid i ultralydsbade
- patenteret sammensætning af stoffer

Anvendelsesområder

Rengøring og desinfektion af fleksible og stive endoskoper, kirurgiske instrumenter, anæstesiudstyr og åndedrætsmasker.

Brugsanvisning

gigasept® AF er et koncentreret produkt og fortyndes med koldt vand til den ønskede arbejdskoncentration.

Oparbejd fleksible endoskoper med en påføringskoncentration på maks 2%!

Dosering: Afhængig af effektiviteten 0.5 % – 5 %.

Eksempel på anvendelse: 1 liter af en 5 % arbejdsopløsning svarer til 950 ml vand og 50 ml gigasept® AF forte.

Nedsæk instrumenter, der skal oparbejdes, i gigasept® AF forte-opsættelsen umiddelbart efter brug. Sørg for, at alle overflader vaskes fuldstændigt, og lad dem trække i opløsningen. Nedsæk hule instrumenter, således at luften slipper ud af hulrummet. Efter brug skal instrumenterne skylles grundigt med vand, der mindst har drikkevandskvalitet, eller endnu bedre med sterilt destilleret eller demineraliseret vand, for at fjerne eventuelle rester af arbejdsopløsningen.

Overskrid ikke de angivne kontakttider og koncentrationer. Bemærk behandlingsanbefalingerne fra instrumentproducenterne. Nationale regler kan kræve, at rengøring og desinfektion udføres i to separate processer.

Ikke egnet til endelig desinfektion af semi-kritisk og kritisk medicinsk udstyr!

Henstandstid:

En standtid på 7 dage gælder, hvis arbejdsopløsningen kun anvendes til desinfektion af tidligere rengjorte instrumenter. Hvis arbejdsopløsningen bruges til rengøring, kan nationale regler begrænse den tidsperiode, hvori opløsningen må bruges.

Mikrobiologisk effekt

Effektivitet	Koncentration	Kontaktid
bakteriedræbende EN 13727, EN 14561 i henhold til VAH - beskidte forhold	5 % (50 ml/l) 2 % (20 ml/l) 0.75 % (7.5 ml/l)	5 min. 15 min. 30 min.
gærdræbende EN 13624, EN 14562 i henhold til VAH - beskidte forhold	5 % (50 ml/l) 2 % (20 ml/l) 0.75 % (7.5 ml/l)	5 min. 15 min. 30 min.
mycobaktericid EN 14348, EN 14563 i henhold til VAH - beskidte forhold	5 % (50 ml/l) 2 % (20 ml/l) 0.75 % (7.5 ml/l)	5 min. 15 min. 30 min.
virusdræbende mod kappeklædte vira (inkl. HIV, HBV, HCV) EN 14476, EN 17111 - beskidte forhold	1 % (10 ml/l) 0.5 % (5 ml/l)	5 min. 15 min.
virusdræbende mod kappeklædte vira (inkl. HIV, HBV, HCV) i overensstemmelse med DVV-ordningen (Tysk Registreret Forening for Bekæmpelse af Virussygdomme)/RKI Guideline	1 % (10 ml/l) 0.5 % (5 ml/l)	5 min. 15 min.
Rotavirus EN 14476 - beskidte forhold	2 % (20 ml/l)	15 min.
Adenovirus i overensstemmelse med DVV-ordningen (Tysk Registreret Forening for Bekæmpelse af Virussygdomme)/RKI Guideline	2 % (20 ml/l)	60 min.
Polyoma SV40 i overensstemmelse med DVV-ordningen (Tysk Registreret Forening for Bekæmpelse af Virussygdomme)/RKI Guideline	2 % (20 ml/l)	15 min.
Ultralydsbad (bakteriedræbende, gærdræbende, mycobaktericid, virusdræbende mod kappeklædte vira inkl. HIV, HBV, HCV)	2 % (20 ml/l)	5 min.

Certifikater

- IHO liste
- VAH certificate



gigasept® AF forte

Produktdata

Sammensætning:

100 g desinfektionsmiddelopløsning indeholder følgende aktive stoffer:

10 g dimethyldioctylammoniumchlorid, 15 g phenoxypropanoler, 15,6 g alkylguanidinat, 9,5 g laurylpropylenediamin.

Kemiske-fysiske data

Farvetæthed	grøn
Flammepunkt	ca. 0,99 g/cm ³ / 20 °C
Form	62 °C / Metode: DIN 51755 Del 1
pH	væske
Viskositet, dynamisk	9,8 – 10 / 20 °C
	ca. 60 mPa*s / 20 °C / Metode: ISO 3219

Særlige råd

Læs altid etiketten og produktinformationen før brug.

Kun til professionel brug. Alle alvorlige hændelser relateret til produktet skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed. Brug ikke produktet, efter at holdbarheden er udløbet. Hold beholderen tæt lukket. Beskyt mod frost, varme og sollys. Opbevares i den originale beholder.

Ved brug af 5 % stamopløsninger kan utilsigtet kontakt med øjnene resultere i irritation af slimhinden.

På grund af valget af yderst effektive ingredienser kan uklarhedseffekter (opalescens) forekomme ved de anbefalede brugskoncentrationer. Disse effekter er produktspecifikke og begrænser ikke produktets effektivitet.

Udover manuel oparbejdning er gigasept® AF forte også velegnet til semi-automatiske processer ved stuetemperatur.

Interaktioner:

Som hovedregel må gigasept® AF forte ikke blandes med andre produkter. Hvis gigasept® AF forte kommer i kontakt med aldehydholdige arbejdsopløsninger, kan der forekomme udfældning og irreversibel misfarvning.

Information til bestilling

Vare	Leveringsform	Varenr..
gigasept® AF forte 2 l-flaske	5 / kartoner	på forespørgsel

Relaterede produkter

- chirosan Plus
- gigasept FF
- gigazyme
- rotasept

Miljøoplysninger

schülke fremstiller produkter økonomisk og med avancerede, sikre og miljøvenlige produktionsmetoder samtidig med, at høje kvalitetsstandarder opretholdes.

Ekspertudtalelse og information

Besøg vores hjemmeside for en oversigt over al tilgængelig litteratur/rapporter om produktet: www.schuelke.com

For individuelle spørgsmål:

Kundeservice

telefon: +45 70 266 244

info.wetwipe@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH holds a Manufacturer's Authorisation according to sect 13 para 1, German Drug Law and Certificates of GMP Compliance for medical products.

schülke headquarter
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt,
Germany
Phone +49 40 52100-0
Fax +49 40 52100-318
www.schuelke.com
info@schuelke.com

Danish distributor
Wet Wipe A/S
Vallensbaekvej 65
2625 Vallensbaek
Denmark
Phone +45 70 266 244
Fax: +45 70 266 233
www.wetwipe.eu
info.wetwipe@schuelke.com